

Pronto Uso

1. Dados do Produto

Assert Pronto Uso é um limpador e desinfetante hospitalar, à base de Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida Polimérica (PHMB), limpa e desinfeta em uma única etapa, com ação em 1 minuto. Proporcionando agilidade na limpeza de áreas com maior incidência e risco de contaminação.

Eficácia comprovada contra fungos e bactérias, como: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Trichophyton Mentagrophytes, Candida Albicans, Acinetobacter Baumannii, Enterococcus Hirae, Enterococcus Faecium, Klebsiella Pneumoniae (KPC).

Produto pronto uso, indicado para superfícies fixas e artigos não críticos. Pode ser amplamente utilizado em diversas superfícies e equipamentos hospitalares, tais como: centros cirúrgicos, UTIs, áreas de isolamento, CMEs, emergências, alas infantis, maternidades, dentre outras. Não agride os pisos tratados. Indicado também para artigos não críticos como, monitores, transdutores, cabos, suportes de soro, comadres, papagaios, aparelhos de pressão, termômetros, entre outros

Composição Química: Ativos, Tensoativo Anfótero, Solvente, Coadjuvantes, Sequestrante, Conservante E Veículo.

Princípio ativo Cloreto De Benzil Coco Alquil Dimetil Amônio e Cloreto De Alquil

Dimetil Benzil Amônio 0,53% E Polihexametileno Biguanida 0,20%.

Validade: 24 meses



2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade (g/mL)	0,9400 – 1,040
pH	6,9 – 8,9

3. Modo de Usar

Para superfícies fixas e artigos não-críticos: Pulverizar Assert Pronto Uso com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop na superfície. Espalhar, deixar agir por 1 minuto. Enxaguar se necessário.

Método	Diluição	Tempo de contato
Superfícies fixas e artigos não-críticos	Produto pronto para o uso	1 minuto

Para artigos não-críticos, quando usado por imersão, deixar agir por 1 minuto, em seguida enxaguar e secar com outro pano seco e limpo.

4. Propriedades

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida • Pronto para o uso • Limpeza e desinfecção em uma aplicação | <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem prática com gatilho • Alto poder de desinfecção • Ação em 1 minuto |
|--|--|

5. Embalagem

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Frasco com gatilho: 6 X 500 mL | <ul style="list-style-type: none"> • Frasco com gatilho: 6 X 1L |
|--|--|

6. Anvisa

Produto Registrado na Anvisa nº 315120022

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com